

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Название дезинфицирующего средства и фирмы-производителя	Вид инфекции	Режимы дезинфекции		Применение
		Концентрация раствора, %	Время выдержки, мин.	
Аламинол (Россия)	Вирусные	8,0	60	Для изделий из стекла, металлов, пластмасс, резин, в том числе стоматологических инструментов
	Бактериальные	1,0	60	
	Туберкулез	3,0	90	
	Кандидозы	3,0	90	
	Дерматофитии	3,0	60	
Бианол (Россия)	Вирусные	1,5	30	Для изделий из стекла, металлов, пластмасс, резин, в том числе эндоскопов и инструментов к ним
	Бактериальные			
	Туберкулез			
	Кандидозы			
	Дерматофитии			
Глутарал (Россия), Глутарал-Н (Россия)	Вирусные	Без разведения	15	Для изделий из стекла, металлов, пластмасс, резин, в том числе эндоскопов, инструментов к ним, стоматологических инструментов
	Бактериальные		15	
	Туберкулез		90	
	Кандидозы		90	
	Дерматофитии		90	
Сайдекс ("Джонсон энд Джонсон Медикал Лтд", США)	Вирусные	Без разведения	15	То же
	Бактериальные		15	
	Туберкулез		90	
	Кандидозы		30	
	Дерматофитии		90	
Стераниос 20% концентрированный ("Аниос", Франция)	Вирусные	1,0	15	Для изделий из стекла (кроме микропипеток), металлов, пластмасс, резин, в том числе эндоскопов, инструментов к ним
	Бактериальные			
Формалин (по формальдегиду)	Туберкулез			Для изделий из стекла, металлов, пластмасс, резин
	Дерматофитии			
	Вирусные	4,0	60	
	Бактериальные	3,0	30	
	Туберкулез	10,0	60	
Гигасепт ФФ ("Шюльке и Майр", Германия)	Вирусные	10,0	60	Для изделий из стекла, металлов, пластмасс, резин, в том числе эндоскопов, инструментов к ним, стоматологических инструментов
	Бактериальные	3,0	30	
	Туберкулез	3,0	60	
	Дерматофитии	3,0	60	
	Туберкулез	10,0	60	
Септодор-Форте ("Дорвет Лтд", Израиль)	Вирусные	0,4	60	Для изделий из стекла, металлов, пластмасс, резин, в том числе эндоскопов, инструментов к ним, стоматологических инструментов
	Бактериальные	0,1	60	
	Туберкулез	0,4	90	
	Кандидозы	0,2	60	
	Дерматофитии	0,4	90	
Лизоформин-3000 ("Лизоформ Д-р Ганс Роземанн ГмбХ", Берлин, Германия)	Вирусные	0,75	60	Для изделий из стекла, металлов, пластмасс, резин, в том числе эндоскопов и инструментов к ним
	Бактериальные			
	Туберкулез			
	Кандидозы			
	Дерматофитии			
Альдазан-2000	Вирусные	6,0	60	Для изделий из стекла,

("Лизоформ Д-р Ганс Роземанн ГмбХ", Берлин, Германия)	Бактериальные	3,0	60	металлов, пластмасс, резин
	Туберкулез	3,0	60	
	Кандидозы	3,0	60	
	Дерматофитии	3,0	60	
Дезоформ ("Лизоформ Д-р Ганс Роземанн ГмбХ", Берлин, Германия)	Вирусные	1,0	60	Для изделий из стекла, металлов, пластмасс, резин, в том числе эндоскопов и инструментов к ним
	Бактериальные	1,0	90	
	Туберкулез	1,0	90	
	Кандидозы	1,0	120	
	Дерматофитии	1,0	120	
Корзолин иД ("Боде Хеми ГмбХ и К°", Германия)	Вирусные	10,0	15	То же
	Бактериальные	3,0	60	
	Туберкулез	3,0	60	
	Кандидозы	3,0	60	
Секусепт-Форте ("Хенкель Эколаб АБ", Финляндия)	Вирусные	5,0	30	--
	Бактериальные	1,5	60	
	Туберкулез	5,0	30	
	Кандидозы	3,0	30	
	Дерматофитии	3,0	30	
КолдСпор ("Метрекс Ресерч Корпорейшн", США)	Вирусные	10,0	10	Для изделий из стекла, металлов, пластмасс, резин, в том числе эндоскопов, инструментов к ним, стоматологических инструментов
	Бактериальные			
	Туберкулез			
	Кандидозы			
Деконекс-50 ФФ ("Борер Хеми АГ", Швейцария)	Вирусные	2,0	30	Для изделий из стекла, металлов, пластмасс, резин
	Бактериальные	1,0	30	
	Туберкулез	1,5	120	
	Кандидозы	1,5	90	
Хелипур Х плюс ("Б. Браун Мельзунген АГ", Германия)	Вирусные	3,0	120	Для изделий из стекла, металлов, пластмасс, резин, в том числе эндоскопов и инструментов к ним
	Бактериальные	1,5	60	
	Туберкулез	2,5	90	
	Кандидозы	1,5	120	
	Дерматофитии	1,5	120	
Антисептика комби инструментен-дезинфекцион (научно-производственное объединение "Антисептика", Германия)	Вирусные	2,0	60	Для изделий из стекла, металлов, пластмасс, резин, в том числе эндоскопов, инструментов к ним, стоматологических инструментов
	Бактериальные			
	Туберкулез			
	Кандидозы			
Альдесол ("Плива", Хорватия)	Вирусные	12,0	30	Для изделий из стекла, металлов, пластмасс, резин
	Бактериальные	2,0	30	
	Туберкулез	3,0	60	
	Кандидозы	3,0	30	
	Дерматофитии	3,0	120	
Дюльбак растворимый ("Петтенс Франс Химия", Франция)	Вирусные	Без раз-	15	Для изделий из стекла, металлов, пластмасс, резин, в том числе эндоскопов и инструментов к ним
	Бактериальные	ведения	15	
	Туберкулез		90	
	Кандидозы		15	
Лизетол АФ ("Шюльке и Майр", Германия)	Вирусные	4,0	15	Для изделий из стекла, металлов, пластмасс, резин
	Бактериальные	2,0	30	
	Туберкулез	2,0	60	
	Дерматофитии	2,0	60	
Хлоргексидина глюконат (Гибитан) (спиртовой раствор) ("Польфа", Польша; "Ай-Си-Ай", Англия)	Вирусные	0,5	30	Для изделий из стекла, металлов, пластмасс, резин, в том числе эндоскопов и инструментов к ним
	Бактериальные	0,5	15	

Велтосепт (Россия)	Вирусные	Без раз-	15	Для изделий из стекла, металлов, полимерных ма- териалов, резин, в том числе эндоскопов, инстру- ментов к ним, стоматоло- гических инструментов
	Бактериальные	ведения	15	
	Туберкулез		30	
	Кандидозы		15	
Спирт этиловый (Россия)	Вирусные	70,0	30	Для изделий из металлов
	Бактериальные	70,0	15	
	Кандидозы	70,0	30	
Дюльбак ДТВ/Л (Дюльбак-Макси) ("ПФХ Петтенс Хи- мия", Франция)	Вирусные	2,0	15	Для изделий из стекла, металлов, пластмасс, резин
	Бактериальные			
Пливасепт 5% глю- конат без ПАВ ("Плива", Хорва- тия)	Вирусные	0,5	30	То же
	Бактериальные	водно-		
	Туберкулез	спиртовой		
	Кандидозы	раствор		
Пливасепт 5% концентрат с ПАВ ("Плива", Хорватия)	Вирусные	То же	30	--
	Бактериальные			
	Туберкулез			
	Кандидозы			
Велтолен ("ВЕЛТ", Россия)	Вирусные	2,5	60	Для изделий из стекла, металлов, полимерных ма- териалов, резин, в том числе эндоскопов, инстру- ментов к ним, стоматоло- гических инструментов
	Бактериальные	1,0	60	
	Туберкулез	5,0	60	
	Кандидозы	2,5	60	
	Дерматофитии	2,5	60	
Дезэфект (Сани- фект-128) ("Лик- ва-Тех. Индас- триез Инк.", США)	Вирусные	3:128	60	Для изделий из стекла, металлов, пластмасс, ре- зин, в том числе эндоско- пов и инструментов к ним
	Бактериальные	3:128	30	
	Туберкулез	3:128	60	
	Кандидозы	3:128	60	
	Дерматофитии	3:128	120	
Перекись водорода (Россия)	Вирусные	4,0	90	Для изделий из стекла, коррозионностойких метал- лов, пластмасс, резин
	Бактериальные	3,0	80	
	Туберкулез	3,0	180	
	Дерматофитии	3,0	180	
Перекись водорода с 0,5% моющего средства Прог- ресс, Астра, Айна, Лотос, Маричка (Россия)	Вирусные	4,0	90	То же
	Бактериальные	3,0	80	
	Туберкулез	3,0	180	
	Дерматофитии	3,0	180	
Пероксимед (Рос- сия)	Вирусные	3,0	60	--
	Бактериальные	3,0	30	
	Туберкулез	3,0	120	
	Дерматофитии	3,0	180	
ПВК (Россия)	Вирусные	3,0	60	--
	Бактериальные	0,5	30	
Виркон ("КРКА", Словения)	Вирусные	2,0	10	Для изделий из стекла, коррозионностойких метал- лов, пластмасс, резин (кроме эндоскопов)
	Бактериальные			
Секусепт- Пульвер	Вирусные	1,0	10	Эндоскопы
	Бактериальные			
Секусепт- Пульвер	Вирусные	2,0	120	Для изделий из стекла,

("Хенкель Эколаб АБ", Финляндия)	Бактериальные	2,0	60	коррозионностойких металлов, пластмасс, резин
	Кандидозы	2,0	60	
	Дерматофитии	2,0	60	
Виркон ("Натуран", Польша)	Вирусные	2,0	10	Для изделий из коррозионностойких металлов
	Бактериальные			
Дезоксон-1, Дезоксон-4 (Россия)	Вирусные	0,5	60	Для изделий из стекла, коррозионностойких металлов, пластмасс, резин
	Бактериальные	0,1	15	
	Туберкулез	0,5	60	
ДП-2 (Россия)	Вирусные	0,5	60	То же
	Бактериальные	0,1	60	
	Туберкулез	0,5	60	
Клорсепт ("Медентек Лтд", Ирландия)	Вирусные	0,1	60	Для изделий из стекла, коррозионностойких металлов, полимерных материалов (резин, пластмасс)
	Бактериальные	0,1	60	
	Туберкулез	0,3	60	
	Кандидозы	0,2	60	
	Дерматофитии	0,2	60	
Жавелион ("Етс Линоссиер", Франция)	Вирусные	0,1	60	Для изделий из стекла, коррозионностойких металлов, полимерных материалов
	Бактериальные	0,1	60	
	Туберкулез	0,2	60	
	Кандидозы	0,2	60	
	Дерматофитии	0,2	60	
Пюржавель ("Гидрохим", Франция)	Вирусные	0,1	60	То же
	Бактериальные	0,1	60	
	Туберкулез	0,2	60	
	Кандидозы	0,2	60	
	Дерматофитии	0,2	60	
Деохлор ("ПФХ Петтенс Химия", Франция)	Вирусные	0,1	15	Для изделий из стекла, коррозионностойких металлов, полимерных материалов
	Бактериальные	0,1	15	
	Туберкулез	0,2	60	
	Кандидозы	0,2	15	
	Дерматофитии	0,2	15	
Пресепт ("Джонсон и Джонсон Медикал", США)	Вирусные	0,056	90	То же
	Бактериальные	0,056	90	
	Туберкулез	0,28	45	
	Кандидозы	0,112	30	
	Дерматофитии	0,163	30	
Хлорамин (Россия)	Вирусные	3,0	60	--
	Бактериальные	1,0	30	
	Туберкулез	5,0	240	
	Дерматофитии	5,0	240	
Гипохлорит натрия, получаемый электрохимическим методом	Вирусные	0,5	60	Для изделий из стекла, пластмасс (ПВХ), силиконовой резины
	Бактериальные	0,25	15	
	Дерматофитии	0,3	60	
Анолиты	Вирусные	0,02 - 0,05	30 - 180	То же
	Бактериальные	0,02 - 0,05	30 - 180	
	Туберкулез	0,02 - 0,06	30 - 300	
	Кандидозы	0,02 - 0,06	60 - 240	
	Дерматофитии	0,02 - 0,06	30 - 240	
	Деконекс Денталь	Вирусные	Без раз-	

БВ ("Борер Хеми АГ", Швейцария)	Бактериальные Кандидозы	ведения			логических инструментов
Гротанат Борербад ("Шюльке и Майр", Германия)	Вирусные Бактериальные Туберкулез Кандидозы Дерматофитии	Без раз- ведения	30		То же
ИД-220 ("Дюрр-Денталь-Орохим", Германия)	Вирусные Бактериальные Туберкулез Кандидозы Дерматофитии	Без раз- ведения	30		---
ИД-212 ("Дюрр-Денталь-Орохим", Германия)	Вирусные Бактериальные Туберкулез Кандидозы Дерматофитии	4,0 2,0 4,0 2,0 4,0	60 60 60 60 60		Для изделий из стекла, металлов, резин, пласт- масс, стоматологических инструментов
Шюльке и Майр-Матик ("Шюльке и Майр", Германия)	Вирусные Бактериальные Туберкулез Кандидозы	2,0	2		Отсасывающие стоматоло- гические системы
Оротол Ультра ("Дюрр-Денталь-Орохим", Германия)	Вирусные Бактериальные Кандидозы Туберкулез	1,0	2		Отсасывающие стоматоло- гические системы
		1,0	180		Слюноотсосы

Примечание. Концентрации рабочих растворов средств Глутарал, Глутарал-Н, формалин, хлоргексидина глюконат (Гибитан), спирт этиловый, Пливасепт 5% глюконат без ПАВ, Пливасепт 5% глюконат с ПАВ, перекись водорода с моющим средством, Пероксимед, ПВК, Дезоксон-1 и Дезоксон-4, Клорсепт, Жавелион, Пюржавель, Деохлор, Пресепт, гипохлорит натрия, анолиты приведены по ДВ, остальных средств - по препарату.