

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК В ПАРОВЫХ СТЕРИЛИЗАТОРАХ

Объем стерилизационной камеры, куб. дм	Число контрольных точек	Расположение контрольных точек	
		Описание	Схема (не приводятся)
До 100 включительно	5	<p>Для стерилизаторов круглых вертикальных:</p> <p>т. 1 - в верхней части камеры;</p> <p>т. 2 - в нижней части камеры;</p> <p>т. 3 - 5 - в центре стерилизационных коробок или внутри стерилизуемых упаковок, размещенных на разных уровнях</p> <p>Для стерилизаторов круглых горизонтальных:</p> <p>т. 1 - у загрузочной двери;</p> <p>т. 2 - у противоположной стенки;</p> <p>т. 3 - 5 - в центре стерилизационных коробок или внутри стерилизуемых упаковок</p>	
Свыше 100 до 750 включительно	11	<p>Для стерилизаторов круглых горизонтальных и стерилизаторов прямоугольных:</p> <p>т. 1 - у загрузочной двери;</p> <p>т. 2 - у противоположной стенки;</p> <p>т. 3 - 11 - в центре стерилизационных коробок или внутри стерилизуемых упаковок</p>	
Свыше 750	13	<p>Для стерилизаторов прямоугольных:</p> <p>т. 1 - у загрузочной двери;</p> <p>т. 2 - у противоположной стенки (разгрузочной двери);</p> <p>т. 3 - 13 - в центре стерилизационных коробок или внутри стерилизуемых упаковок, размещенных на разных уровнях</p>	

Примечание. Контрольные точки 1 и 2 находятся в стерилизационной камере вне стерилизуемых изделий.